



# 抗原検査キット使用説明

- 1 キットが全て揃っているか確認する。

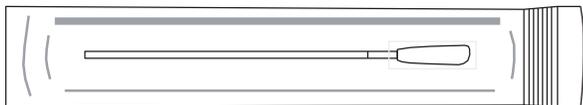

★開封後は1時間以内に使用してください。  
★テストカートリッジは室温に戻してから使用してください

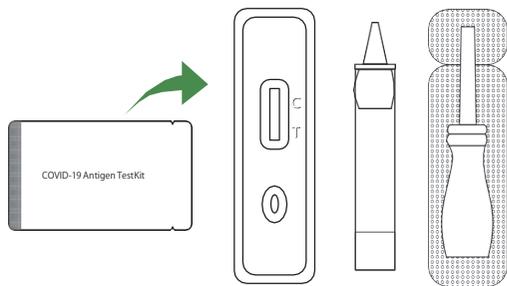

抗原検査キットの使い方は動画でも確認できます！




- 2 袋から検体採取用スワブを取り出し、スワブを鼻の奥までゆっくりと奥に入れて下さい。そして鼻の奥に届きましたらスワブを粘膜をこすりつけるように採取してください。それからゆっくりとスワブを抜いてください。




- 3 採集容器の中に展開液を7滴入れていきます。




- 4 続きまして採取した粘膜を採集容器の中に入れてかき混ぜます。

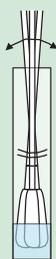

- 5 かき混ぜましたらスワブを入れた状態で10回ほど揉んでください。

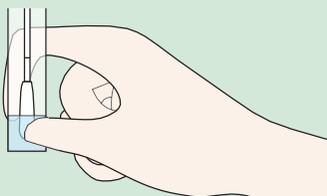


- 6 10回ほど揉みましたらスワブを取り出して容器にキャップして下さい。

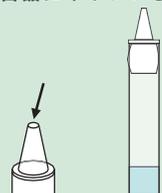


キャップには穴が開いているので、キャップを差し込んだ後は持ち方に注意してください

- 7 検査キットを開封してテストカートリッジを取り出し、検査キットのテストカートリッジの下の部分に混ぜ合わせた液を3滴垂らしてください。

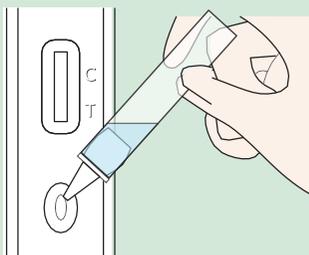


- 8 全体が徐々に染まったのち、約15分でラインがはっきり確認できます。

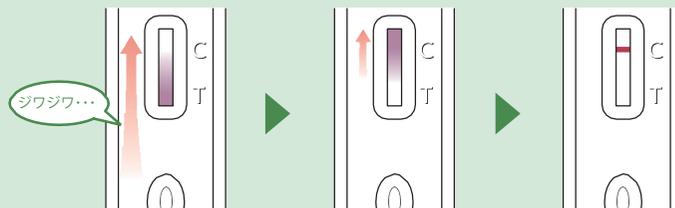

展開液の滴下後、10～15分経過したら結果が確認できます。

※20分以上の長時間経過後の結果は無効になります。

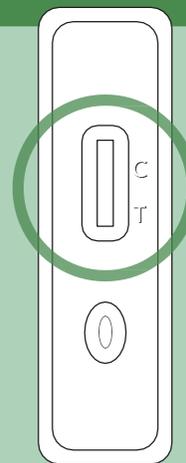

| 陰性           | 陽性                           | 無効                             |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|              |                              |                                |
| Nタンパク質<br>陰性 | Nタンパク質<br>陽性                 |                                |
| ウイルス未検出      | PCR検査とともに<br>確定診断を<br>推奨します。 | Cのラインが<br>出ない場合は無効<br><再検査が必要> |

## 陽性反応が出たら保健所、または医療機関に相談を推奨

「T」に「陽性」判定が出た方は、新型コロナウイルスに感染している可能性がありますので、PCR検査とともに確定診断を推奨致します。  
新型コロナウイルスと思われる症状の発症後2日目～9日目の間にこの検査で「陰性」の場合は、その時点では新型コロナウイルスに感染していない可能性はありますが保証する事はできません。今後の感染リスクがあるため、注意が必要です。  
不安な場合は、メールまたは電話にて医療機関にご相談ください。



## ■保管条件と有効期間

- 本検査キットの内容物は開封後、室温下で1時間以内にご使用ください。未開封の場合、4℃～30℃の保管にて、生産日から1年間が本検査キットの有効期間となります。適切な条件で保管されていても、有効期限が切れたキットは使用しないでください。
- 凍結しないでください。
- 破損等が確認されるキットは使用しないでください。

## ■重要事項

本製品の陰性結果は、SARS-COV-2に感染している可能性を否定するものではありません。検査キットの判定結果は、治療及び、診断目的に使用はできません。

- ※本製品は研究試薬です。
- ※本製品は清潔な環境で正確・速やかに検査することが重要です。
- ※本製品の使用により発生した損害および損失について弊社は一切の責任を負いません。